



**DETVIEW**  
POWERED BY DETCOM

# Používateľská príručka pre administrátorov

**DetCom Systems s.r.o.**

**Verzia: 3.0**

**© 2022 detcom**

**[www.detview.com](http://www.detview.com)**

## Obsah

Úvod .....	2
Úvodná stránka, Prihlásenie .....	2
Podrobný popis prihlásenia .....	2
Stránka lekárov .....	3
Podrobný popis stránky .....	4
Stránka pacientov .....	5
Podrobný popis stránky .....	6
Stránka nesprávnych e-mailov .....	8
Štatistická stránka.....	8

## Úvod

Dokument obsahuje podrobný popis systému detview na úrovni administrátora.

### Úvodná stránka, Prihlásenie

Na stránke je aj možnosť výberu jazyka, ktorý by ste si pred prvým použitím mali vybrať z rozbaľovacej ponuky.


#### Podrobný popis prihlásenia:

1, Na vašu e-mailovú adresu bude odoslaný mail s odkazom, kliknutím naň úhlasíte s uložením vašej e-mailovej adresy.




Váš súhlas je prijatý. Systém odošle nový e-mail s odkazom na nastavenie hesla.

2, Kliknutím na odkaz prijatý v nasledujúcom e-maily sa dostanete do rozhrania so žiadosťou o zadanie hesla. Tu zadajte svoje heslo podľa vlastného výberu a potom stlačte tlačidlo „Uložiť“. Pri zadávaní vášho hesla dbajte na svoju bezpečnosť. Vyžaduje sa minimálne 8 znakov vrátane špeciálnych znakov, číslíc, malých a veľkých písmen.

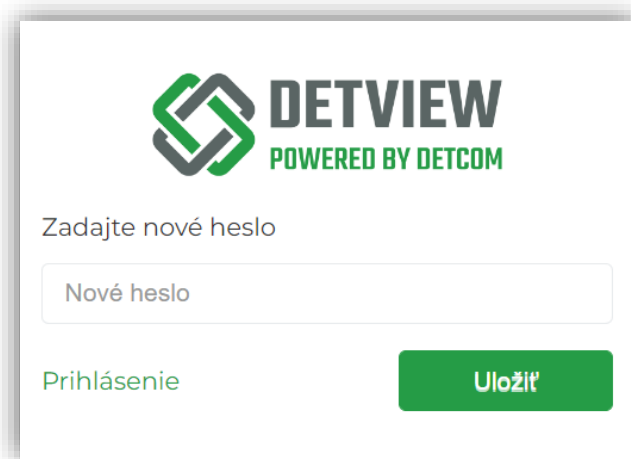

The screenshot shows the 'Zadajte nové heslo' (Set new password) form. At the top is the DETVIEW logo with the tagline 'POWERED BY DETCOM'. Below the logo, the text 'Zadajte nové heslo' is displayed. There is a text input field labeled 'Nové heslo'. At the bottom left, there is a link 'Prihlásenie' (Login), and at the bottom right, there is a green button labeled 'Uložiť' (Save).

3, V prípade úspešného uloženia hesla budete informovaný emailom.

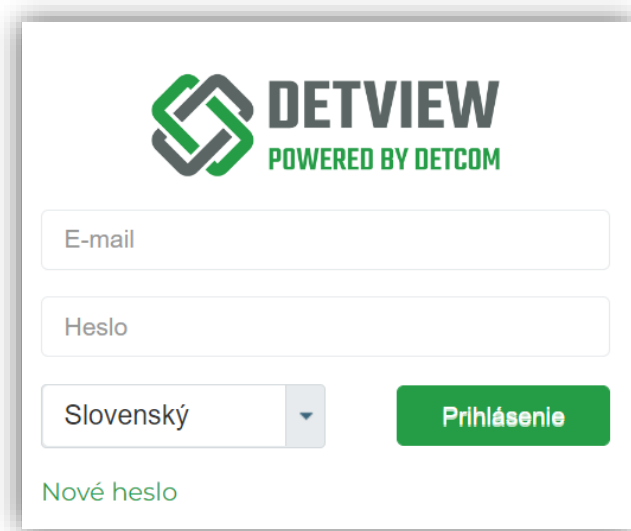

The screenshot shows the login form. At the top is the DETVIEW logo with the tagline 'POWERED BY DETCOM'. Below the logo, there are two text input fields: 'E-mail' and 'Heslo'. To the right of the 'Heslo' field is a dropdown menu currently showing 'Slovenský'. At the bottom right, there is a green button labeled 'Prihlásenie' (Login). At the bottom left, there is a link 'Nové heslo' (New password).

4, Ak chcete vstúpiť do systému, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Následne kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“.

### Stránka lekárov

- Tu môžete pridať alebo zmeniť e-mailovú adresu lekárov.
- Z ponuky v hornej časti stránky máte tiež prístup k položkám zdieľania, používateľskej príručky a často kladeným otázkam.
- Systém vám umožní priradiť viacero lekárov k jednej emailovej adrese. Je to potrebné v prípade, ak je lekár v systéme uložený pod viac ako jedným menom.

Meno	Fotky	Posledné fotky	E-mail	Upozornenie na novú snímku	
Dr. Nagy	3706	11-08-2022 13:45:44	nagy@detcom.hu	✘	<span>Povoliť</span> <span>Uložiť</span>
Dr. Alex M	252	08-19-2020 17:10:01		✘	<span>Uložiť</span>
Dr. Kiss Jan	267	07-05-2022 12:18:20	kiss@detcom.hu	✔	<span>Zablokovať</span> <span>Uložiť</span>
Dr. Tooth	291	08-10-2022 16:15:25		✘	<span>Uložiť</span>

### Podrobný popis stránky:

- Stĺpce na rozhraní je možné usporiadať podľa vlastného výberu.
- Vyplnením polí „Meno“ a „E-mail“ môžete dosiahnuť rýchlejšie vyhľadávanie.
- V základnom nastavení je na stránke iba 10 lekárov, ktorých počet je možné zvýšiť na 50 pomocou rozbaľovacej ponuky v spodnej časti stránky. Ak chcete vidieť viac, môžete sa posunúť do spodnej časti stránky.
- Zo systému sa môžete odhlásiť kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť“ vpravo.
- Kliknutím na tlačidlo „Upraviť“ môžete ku konkrétnemu lekárovi pridať emailovú adresu, prípadne môžete upraviť existujúcu. Táto e-mailová adresa určuje, kto má prístup do systému.,

Meno	Fotky	Posledné fotky	E-mail	Upozornenie na novú snímku	
Dr. Nagy	3706	11-08-2022 13:45:44		✘	<span>Povoliť</span> <span>Uložiť</span>
Dr. Alex M	252	08-19-2020 17:10:01		✘	<span>Uložiť</span>
Dr. Kiss Jan	267	07-05-2022 12:18:20		✔	<span>Zablokovať</span> <span>Uložiť</span>
Dr. Tooth	291	08-10-2022 16:15:25		✘	<span>Uložiť</span>

- Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ sa emailová adresa uloží do systému. Ak je zaškrtnuté políčko „Odoslať emailové upozornenie“, v tom momente bude daný lekár upozornený aj emailom.
- Ak stlačíte tlačidlo „Povoliť“, daný lekár dostane e-mailovú notifikáciu o každom pacientovi, pre ktorého bol záznam uložený. Ak stlačíte

tlačidlo „Vypnúť“ systém nepošle lekárovi upozornenie emailom.

- V zdieľanom denníku si môžete prezerať doteraz zdieľaných pacientov, zdieľajúceho lekára s priradeným lekárom alebo pacientom. Zelená značka označuje aktívne akcie, zatiaľ čo červený kôš vymazané.

DETVIEW POWERED BY DETCOM

Pacienti Log zdieľania Lekári Zlé e-maily Statistika Užívateľská príručka F.A.Q. Kontak Odhlásiť sa

### Zdieľaní pacienti

Meno zdieľaného pacienta	Zdieľateľ	Priradený užívateľ	Dátum zdieľania	Dátum zrušenia zdieľania	Stav zdieľania
Pacient M	Stomatolog s.r.o.	pacient@gmail.com	03-08-2022 11:40:27		✓
Pacient K	Lekar s.r.o.	stomatolog@detcom.hu	04-27-2022 19:02:43		✓
Pacient T	Stomatolog s.r.o.	lekar2@detcom.hu	01-20-2021 11:15:14		✓
Pacient R	Lekar s.r.o.	stomatolog@detcom.hu	05-10-2022 09:39:17		✓

751-754 / 754

Stiahnuť do Excelu

## Stránka pacientov

Na tejto stránke je možné stiahnuť obrázky a 3D záznamy pacientov priradených používateľovi po jednom. Tiež tu máme možnosť zdieľať snímky pacienta s ostatnými lekármi a pacientmi

DETVIEW POWERED BY DETCOM

Pacienti Užívateľská príručka F.A.Q. Odhlásiť sa

### Pacienti

Všetky Aktualizácia

Ordinácia	Meno	Dátum narodenia	Posledná fotka	Fotky	Zdieľať
Stomatolog s.r.o.	Demo Patient	12-05-1920	10-27-2022 11:17:28	40	0
Stomatolog s.r.o.	DemoX-ray 2	03-19-2003	03-30-2022 11:59:37	126	0
Stomatolog s.r.o.	DemoX-ray 2	03-19-2003	11-10-2022 13:34:10	557	0
Ambulancia	Ferenc Varga	05-10-1980	02-18-2022 10:57:34	24	3
Stomatolog s.r.o.	Kovács Z	05-02-2018	05-30-2022 19:30:18	1	0

1-5 / 7

### Zdieľaní pacienti

Aktualizácia


Ordinácia	Meno	Dátum narodenia	Posledná fotka	Fotky	Zdieľať
Nenašiel sa žiadny údaj					

0-0 / 0

## Podrobný popis stránky:

Stránka má dve časti, v jednej sú pacienti a v druhej zdieľaný pacienti. V tom druhom sa objavujú pacienti, ktorých s vami zdieľajú ostatní lekári alebo pacienti.

- Stĺpce na rozhraní je možné usporiadať podľa vlastného výberu.
- Vyplnením polí „Meno“ a „Dátum narodenia“ môžete dosiahnuť rýchlejšie vyhľadávanie.
- Kliknutím na tlačidlo „Otvoriť“ získate všetky snímky daného pacienta, ktoré je možné zo systému vyžiadať.

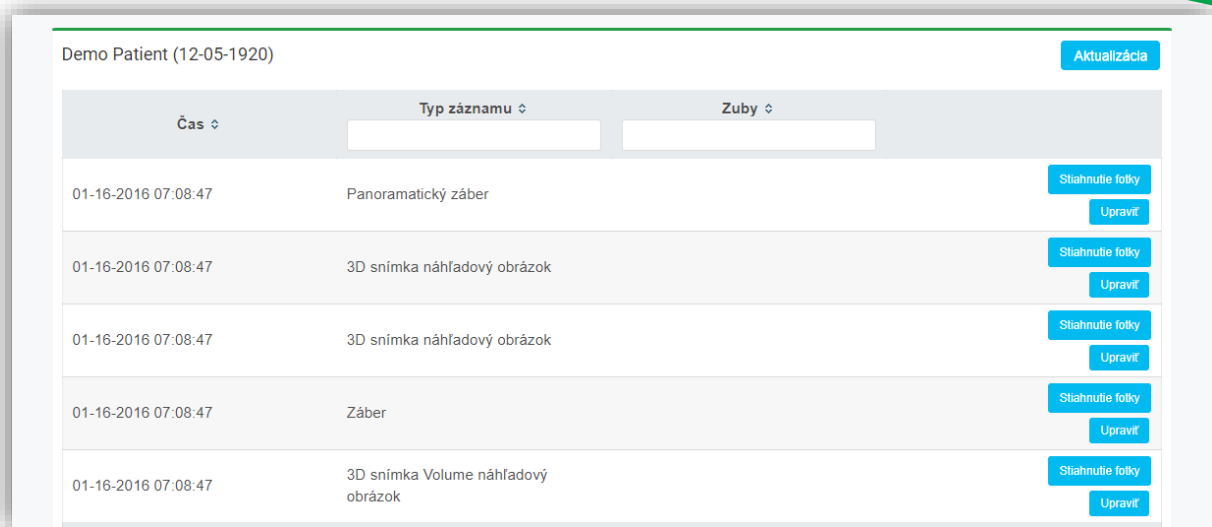

Čas	Typ záznamu	Zuby	
01-16-2016 07:08:47	Panoramatický záber		Stiahnite fotky Upraviť
01-16-2016 07:08:47	3D snímka náhľadový obrázok		Stiahnite fotky Upraviť
01-16-2016 07:08:47	3D snímka náhľadový obrázok		Stiahnite fotky Upraviť
01-16-2016 07:08:47	Záber		Stiahnite fotky Upraviť
01-16-2016 07:08:47	3D snímka Volume náhľadový obrázok		Stiahnite fotky Upraviť

## Na tejto stránke máme viacero možností, ako stiahnuť nahrávky:

1. Kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť obrázok“ sa daný záznam okamžite stiahne vo formáte „jpg“.
2. Kliknutím na tlačidlo „Upraviť“ sa zobrazí záznam na stiahnutie, ktorý je možné pred stiahnutím doostríť podľa želania.




3. Po kliknutí na tlačidlo "Stiahnuť súbor Dicom" sa záznam stiahne vo formáte "dcm" DICOM, takže ho môžeme načítať do vlastného SIDEXIS systému alebo do iných röntgenových zobrazovacích systémov.
4. Po kliknutí na tlačidlo „Bez 3D Viewer“ sa snímky stiahnu vo formáte

priečinka DICOM, ktorý je možné načítať aj do iných kompatibilných röntgenových zobrazovacích systémov


5. Pomocou tlačidla „Stiahnuť s 3D Sidexis 4 Viewer“ si môžeme stiahnuť záznam, ktorý je možné zapísať aj na DVD, ktorého súčasťou je aj program na prezeranie röntgenových záznamov. (veľkosť tohto súboru je viac ako 1 GB, takže sťahovanie potrvá dlhšie!)

Ak stiahnete nahrávky zo staršieho systému, ktorý nie je plne kompatibilný s DICOM, nájdete ich pod exportovanými nahrávkami. V závislosti od exportu môžu existovať:

- 2D a 3D súbory vo formáte "dcm"
- vo formáte 3D DICOM bez Viewer
- vo formáte 3D DICOM so Sidexis4 Viewer0
- v 3D formáte so Sidexis3 Viewer
- Nesprávne exporty sú signalizované systémom.

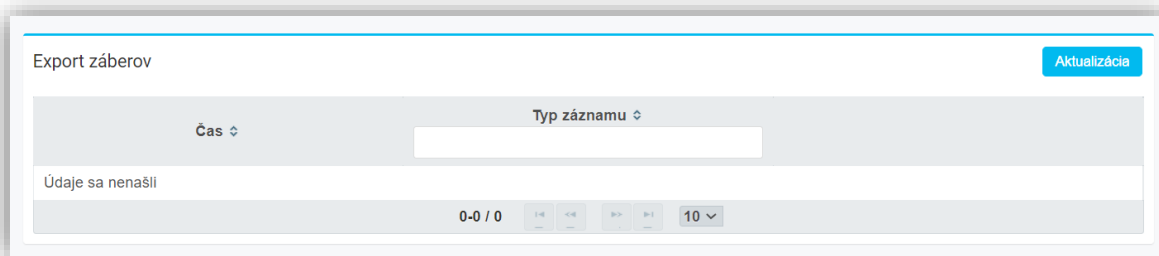


- Kliknutím na tlačidlo „stiahnutie“ systém vytvorí samorozbalovací súbor. Príprava súboru môže chvíľu trvať v závislosti od rýchlosti servera. Hneď ako bude samorozbalovací súbor pripravený, začne sa sťahovanie. Po stiahnutí súbor „exe“ obsahuje údaje pacienta. Ak naň kliknete, rozbalí sa do priečinka, kde ste ho stiahli. Potom je možné spustiť súbor obsiahnutý v rozbalenom súbore rovnakým spôsobom, ako keby sme nahrávku dostali na CD.
- Kliknutím na tlačidlo „Zdieľať“ môžeme zdieľať snímky daného pacienta, s daným lekárom alebo pacientom.

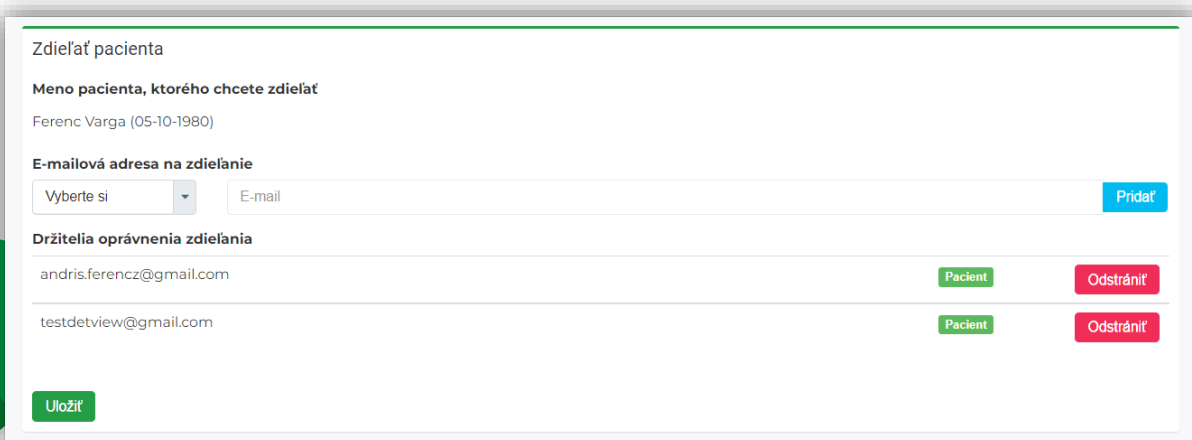

- Tu máte zadať e-mailovú adresu lekára alebo pacienta s ktorými chcete snímky zdieľať. Najprv vyberte z rozbaľovacej ponuky, či chcete zdieľať snímky s pacientom alebo lekárom, a potom zadajte jeho e-mailovú adresu. Po kliknutí na tlačidlo "Pridať" sa zobrazí pop-up okno, v ktorom dostaneme informácie o súhlase s ochranou osobných údajov. Keď s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Uložiť“. Pridané e-mailové adresy je možné vymazať kliknutím na tlačidlo „Odstrániť prídanie“ a následne na tlačidlo „Uložiť“. V oboch prípadoch systém odošle upozornenie na zadané e-mailové adresy.
- V predvolenom nastavení je na stránkach iba 10 pacientov a 10 snímok, ktoré je možné zvýšiť na 50 pomocou rozbaľovacej ponuky v spodnej časti stránky. Ak chcete vidieť viac, môžete sa posunúť do spodnej časti stránky.
- Zo systému sa môžete odhlásiť kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť“ vpravo.

## Stránka nesprávnych e-mailov

Tu sú zobrazené e-mailové adresy, ktoré systém nemohol odoslať, pretože to nie sú skutočné e-mailové adresy alebo boli jednoducho nesprávne zaznamenané. Toto je oznamovacie rozhranie na opravu chýb.

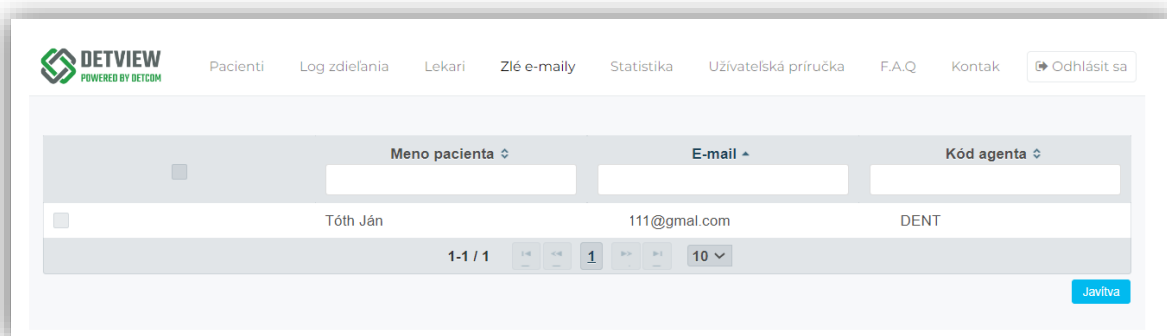

## Štatistická stránka

Na tejto stránke si môžete prezrieť prihlásenia a stiahnuté súbory. Kto, čo, kedy a koľkokrát stiahol.

Filtri		Statistika				
10-10-2022		k stiahnutiu				
11-10-2022		Kód agenta	E-mail	Stáženo	Típus	Orvos neve
<a href="#">Stiahnutie všetkých údajov</a> <a href="#">Stiahnuť do Excelu</a> <a href="#">Stiahnutie prihlásení do Excel-u</a>		DENT	pacient@detcom.hu	1	3D snímka Volume náhľadový obrázok	Röntgen
		DENT	pacient@detcom.hu	4	3D snímka Volume náhľadový obrázok	Röntgen
		DENT	pacient2@detcom.hu	2	3D snímka Volume náhľadový	Röntgen



Celú databázu je možné stiahnuť vo formáte excel, takisto si môžete nastaviť rôzne parametre aj s grafmi.

