



DETVIEW
POWERED BY DETCOM

Felhasználói kézikönyv

Detcom Systems Kft.

Verzió: 3.0

© 2020

www.detview.com

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Bevezetés	2
Login oldal, Bejelentkezés.....	2
Páciensek oldal.....	3

Bevezetés

A dokumentum tartalmazza a detview rendszer felhasználói szintű részletes leírását.

Login oldal, Bejelentkezés

Az oldalon található további nyelvválasztási lehetőség is, melyet az első használat előtt érdemes a legördülő menüből kiválasztani.

Bejelentkezés részletesen:

1, A megadott email címünkre érkezik egy levél, melyben található egy link, erre kattintva hozzájárulunk az email címünk tárolásához.




2, A következő email-ben megkapott linkre kattintva jutunk el, a jelszó bekérő felületre. Itt adjuk meg tetszés szerint a jelszavunkat, majd nyomjunk a „Mentés” gombra. A jelszavunk megadásánál figyeljünk a biztonságra. Kötelező a minimum 8 karakter, melyben speciális karaktereket, számokat, illetve kis és nagybetűket is használjunk.



The screenshot shows a web form for password reset. At the top is the DetView logo with the text 'POWERED BY DETCOM'. Below the logo, the instruction 'Adj meg egy új jelszót' (Provide a new password) is displayed. There is a text input field labeled 'Új jelszó' (New password). Below the input field, there are two buttons: 'Bejelentkezés' (Login) and 'Mentés' (Save). At the bottom of the form, the text 'Szerződött partnerek · © 2018 detcom' is visible.

3, Sikeres mentés esetén, email-ben értesítést kapunk.



The screenshot shows a web form for login. At the top is the DetView logo with the text 'POWERED BY DETCOM'. Below the logo, there are two text input fields: 'E-mail' and 'Jelszó' (Password). Below the 'Jelszó' field, there is a dropdown menu currently showing 'Magyar' (Hungary) and a green 'Bejelentkezés' (Login) button. Below the login button, there is a link for 'Jelszó igénylése \ elfelejtett jelszó' (Password request \ forgot password). At the bottom of the form, the text 'Szerződött partnerek · © 2018 detcom' is visible.

4, Amennyiben be szeretnénk lépni a rendszerbe, adjuk meg e-mail címünket és jelszavunkat, majd „Bejelentkezés” gombra kattintsunk.

Páciensek oldal

Ezen az oldalon lehet a felhasználóhoz rendelt páciensek képeit és 3D felvételeit letölteni egyesével. Illetve, ugyanitt lehetőségünk van a páciens képeinek megosztására további orvosokkal és páciensekkel.

Páciensek							
Rendelő	Név	Szül. idő	Utolso kép	Képek			
NFRC	Anonymous1_DICOMRM SIDEXIS	03.19	2015.09.15 08:28:13	3	Megnyitás	2	Megoszt
NFRC	Ba in	1997.05.03	2015.12.22 09:47:29	1	Megnyitás	1	Megoszt
NFRC	Csaba A	1976.02	2014.06.11 16:19:38	1	Megnyitás	1	Megoszt
NFRC	DemoX-ray 2	2001.03.18	2008.02.01 13:48:27	82	Megnyitás	3	Megoszt
NFRC	Dorina	05.16	2016.04.29 10:49:50	1	Megnyitás	1	Megoszt
NFRC	Péter	2001.03.	2016.11.02 16:49:40	1	Megnyitás	0	Megoszt
NFRC	Roland	.10.07	2016.07.13 07:41:53	1	Megnyitás	0	Megoszt

1-7 / 7 1 10

Megosztott páciensek							
Rendelő	Név	Szül. idő	Utolso kép	Képek			
NFRC	Csabáné	.12.29	2016.12.08 13:39:34	2	Megnyitás		

1-1 / 1 1 10

Az oldal részletes leírása:

Az oldalon két szekció található, az egyikben a páciensek, a másikban a megosztott páciensek találhatóak. Utóbbinál azok a páciensek jelennek meg, melyeket a többi orvos vagy páciens oszt meg velünk.

- A felületen található oszlopokat tetszés szerint sorba rendezhetjük.
- „Név” és „Születési idő” oszlopok kitöltésével gyorsabb keresést eredményezhetünk.
- A „Megnyitás” gombra kattintva, megkapjuk az adott páciensnek, a rendszerből lekérdezhető összes képét.

2020.03.09 09:05:09	Panoráma Felvétel	Dcm fájl letöltés	Kép letöltés	Szerkesztés
2020.03.09 10:22:29	Panoráma Felvétel	Dcm fájl letöltés	Kép letöltés	Szerkesztés
2020.03.10 08:07:36	3D felvétel	Dcm fájl letöltés	3D Viewer nélküli	3D Sidexis4 Viewer-el letöltés

161-170 / 193 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10

Ezen az oldalon többféleképpen tölthetjük le a felvételeket:

1. A „Kép letöltés” gombra kattintva „jpg” formátumban azonnal letöltődik az adott felvétel.
2. A „Szerkesztés” gombra kattintva megjelenik a letöltendő felvétel, melyet tetszés szerint élesíthetünk a letöltés előtt.



3. A „Dicom fájl letöltés” gombra való kattintás után a felvétel „dcm” DICOM formátumba töltődik le, így betölthetjük azt saját SIDEXIS vagy más röntgen megtekintő rendszerekbe.
 4. A „3D Viewer nélkül” gombra kattintás után DICOM „mappa” formátumban tölti le a felvételeket, melyeket szintén betölthetünk más kompatibilis röntgen megtekintő rendszerekbe
 5. A „3D Sidexis4 Viewer-el letöltés” gomb alatt tudjuk letölteni azt a DVD-re is kiírható formátumot, ami tartalmazza a röntgen megtekintő programot is. (ennek a fájlnak a mérete a legnagyobb több mint 1GB, így a letöltés is hosszabb!)
- Ha régebbi nem teljesen DICOM kompatibilis rendszerből töltünk le felvételt, akkor azokat az exportált felvételek alatt találjuk.
Az exportálástól függően lehetnek:
 - 2D és 3D fájlok „dcm” formátumban
 - 3D DICOM formátumban Viewer nélkül
 - 3D DICOM formátumban Sidexis4 viewer-el
 - 3D formátumban Sidexis3 viewer-el
 - A nem megfelelő exportokat a rendszer jelzi

Exportált felvételek

Időpont ↕	Felvétel típusa ↕	
2018.11.18 13:25:21	3D felvétel – Sidexis4 Viewer-el	Letöltés
2018.10.17 21:38:57	Nem megfelelő export (keresse fel röntgencentrumát)	Letöltés
2018.10.17 21:39:56	3D felvétel – Sidexis Viewer nélkül (DICOM)	Letöltés
2018.10.26 08:41:57	3D felvétel – Sidexis3 Viewer-el	Letöltés
2018.10.26 08:46:32	2D felvétel DICOM formátumban	Letöltés
2018.10.26 08:48:12	2D felvétel JPG formátumban	Letöltés

1-6 / 6 1 10 ▼

A letöltés gombra kattintva a rendszer készít egy önkicsomagoló fájlt. A fájl elkészítésére a szerver sebességétől függően várni kell. Amint elkészült a futtatható állomány megkezdődik a letöltés. A letöltést követően a letöltött „exe” tartalmazza a páciens adatait. Ha rákattintunk akkor kicsomagolja abba a mappába ahová letöltöttük. Ezt követően indítható a kicsomagolt állományban található indító fájl ugyanúgy mintha CD-én kaptuk volna meg a felvételt.

- A „Megoszt” gombra kattintva pedig megoszthatjuk az adott páciens képeit, adott orvossal vagy pácienssel.

← Vissza a pácienshez

Páciens megosztás

Megosztani kívánt páciens név
Demo Patient (1920.12.04)

Megosztáshoz tartozó email cím

Válassz Hozzáadás

Válassz

Páciens	Páciens	Hozzáadás törlése
Orvos	Orvos	Hozzáadás törlése

orvos2@mailnesia.com Orvos Hozzáadás törlése

orvos4@mailnesia.com Orvos Hozzáadás törlése

detteszt@mailnesia.com Páciens Hozzáadás törlése

Mentés

- Itt kell be írni annak az orvosnak vagy pácienseknek az email címét, akivel meg akarjuk osztani a képeket.

Elsőnek is válasszuk ki a legördülő menüből, hogy Pácienssel vagy Orvossal osztunk meg, majd írjuk be az email címet. A „Hozzáadás” gombra való kattintás után, megjelenik egy felugró ablak, melyben tájékoztatás kapunk az adatvédelmi hozzájáruláshoz. Ha azt lenyitkoztuk kattintsunk a „Mentés” gombra.

Lehetőségünk van a hozzáadott email címeket törölni, a „Hozzáadás Törlése” majd „Mentés” gombra kattintva. Mind a két esetben a rendszer tájékoztató értesítést küld a megadott Email címekre.

- Alapesetben csak 10 páciens, és 10 kép található az oldalakon, melyet 50-re lehet növelni a lenti legördülő menüvel. Amennyiben többet is meg szeretnénk tekinteni, az oldal alja lapozható.
- A „Kijelentkezés” gombra kattintva, mely a jobb oldalon található, kijelentkezhetünk a rendszerből.